



Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL



FICHA TÉCNICA **BOTIQUÍN**

PRIMEROS AUXILIOS

TIPO B

DESCRIPCIÓN

El Botiquín Tipo B es un kit de atención prehospitalaria de mayor capacidad, diseñado para brindar respuesta inicial ante emergencias de mediana complejidad en entornos empresariales, institucionales, educativos o industriales. Contiene insumos para el manejo de heridas abiertas, hemorragias, inmovilización de extremidades, control de signos vitales y soporte básico mientras se gestiona la atención médica especializada. Incluye materiales estériles, soluciones antisépticas, elementos de inmovilización, dispositivos de evaluación básica y medicamentos de uso común, permitiendo una atención más completa y organizada frente a accidentes laborales o situaciones de emergencia.

USOS

El Botiquín Tipo B está diseñado para la atención inicial de emergencias de mediana complejidad en entornos empresariales, institucionales, industriales o educativos. Permite el manejo de heridas abiertas, hemorragias leves y moderadas, quemaduras superficiales, contusiones, esguinces, fracturas sospechosas mediante inmovilización, y control básico de signos vitales. Es ideal para brindar soporte primario mientras se activa el sistema de emergencias y se realiza el traslado a un centro asistencial si la situación lo requiere.

RECOMENDACIONES

El Botiquín Reglamentario debe mantenerse en un lugar visible, señalizado y de fácil acceso, preferiblemente en áreas secas y protegidas de la humedad, el polvo y la exposición directa a la luz solar o altas temperaturas, con el fin de preservar la integridad de sus componentes. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar el estado del estuche, la integridad de los empaques y las fechas de vencimiento de los insumos, garantizando la reposición inmediata de los elementos utilizados, vencidos o deteriorados.

Es importante que las personas responsables conozcan la ubicación del botiquín y cuenten con nociones básicas en primeros auxilios para su correcta utilización. En caso de presentarse una emergencia de mayor complejidad, el botiquín debe emplearse únicamente como apoyo inicial mientras se solicita y espera la atención de los servicios médicos especializados. Mantener siempre el contenido completo conforme a la lista reglamentaria.





ESTA COMPUESTO POR

Item	Und	Item	Und	Item	Und
Gasas limpias paquete x 100	1	Solución salina 250 cc o 500 cc	5	Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto)	1
Gasas estériles paquete x 3	20	Guantes de látex para examen caja x 100	1	Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto)	1
Apósito o compresas no estériles	4	Termómetro de mercurio o digital	1	Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño)	1
Esparadrapo de tela rollo 4"	2	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	1	Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño)	1
Bajalenguas paquete x 20	2	Tijeras	1	Vasos desechables paquete x 25	1
Venda elástica 2 x 5 yardas	2	Linterna	1	Fonendoscopio	1
Venda elástica 3 x 5 yardas	2	Pilas de repuesto x par	4	Acetaminofén tabletas 500 mg sobre x 10	2
Venda elástica 5 x 5 yardas	2	Tabla espinal larga	1	Hidróxido de aluminio tabletas sobre x 10	1
Venda de algodón 3 x 5 yardas	2	Collar cervical adulto	2	ASA tabletas por 100 mg sobre x 10	1
Venda de algodón 5 x 5 yardas	2	Collar cervical niño	2	Elemento de barrera o máscara para RCP	2
Clorhexidina o yodopovidona jabón quirúrgico x galón	1	Tensiómetro	1		

INDICACIONES DE USO

1. Verifique que el área sea segura antes de intervenir.
2. Colóquese los guantes y demás elementos de protección disponibles.
3. Evalúe el estado de la persona: nivel de conciencia, respiración y tipo de lesión.
4. En caso de hemorragia, aplique presión directa con gasas o apósitos y asegure con venda o esparadrapo.
5. Limpie y desinfecte heridas con solución antiséptica o solución salina según corresponda.
6. Si existe sospecha de fractura o lesión cervical, utilice los inmovilizadores o el collar cervical evitando movimientos innecesarios.
7. Controle signos vitales con los dispositivos disponibles (termómetro, tensiómetro si aplica).
8. Mantenga a la persona en reposo y active de inmediato los servicios de emergencia si la situación lo requiere.
9. Reponga los elementos utilizados y registre el evento según el protocolo interno.

SEDE PRINCIPAL



PBX: (57-601) 829 5743 - 829 5798

320 214 9004 - 321 983 4472

mercadeo@plastempack.com

Parque Industrial San Jorge Mz. P5
Bodega # 52 Troncal de Occidente
Km 19 Vía Bogotá Mosquera
Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ



PBX: (57-601) 261 3005 - 447 6304

320 344 8406 - 311 453 1985

comercial@plastempack.com

Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial
Pradera Bogotá D.C - Colombia