



FICHA TÉCNICA BOTIQUÍN

PRIMEROS AUXILIOS

REGLAMENTARIO

DESCRIPCIÓN

El Botiquín Reglamentario de 18 elementos es un recurso esencial para la atención inmediata de emergencias básicas y primeros auxilios. Está diseñado para cumplir con los requerimientos mínimos exigidos en entornos vehiculares e institucionales, permitiendo una respuesta oportuna ante heridas leves, cortaduras, contusiones y otras eventualidades. Su contenido incluye insumos indispensables para limpieza, protección y control inicial de lesiones, facilitando la estabilización del paciente mientras se recibe atención médica profesional.

USOS

El Botiquín Reglamentario de 18 elementos está diseñado para brindar atención inicial en caso de accidentes o emergencias leves que puedan presentarse en vehículos particulares, transporte público o entornos laborales. Permite realizar procedimientos básicos como limpieza y desinfección de heridas, control de hemorragias menores, inmovilización provisional y protección de lesiones, contribuyendo a estabilizar la situación mientras se solicita o espera asistencia médica especializada.

El kit está compuesto por 18 elementos:





Item	
	Algodón
	Cuantes
	Venda elástica
	Aplicadores
	Analgésico
	Jeringa
	Bisturí
	Preservativo
	Toalla antiséptica
	Cuello ortopédico
	Toalla higiénica
	Agua mineral
	Tapabocas
	Gasa
	Banditas
	Bajalenguas
	Pito
	Gel



SEDE PRINCIPAL

 PBX: (57-601) 829 5743 - 829 5798
 320 214 9004 - 321 983 4472
 mercadeo@plastempack.com
 Parque Industrial San Jorge Mz. P5
 Bodega # 52 Troncal de Occidente
 Km 19 Vía Bogotá Mosquera
 Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ

 PBX: (57-601) 261 3005 - 447 6304
 320 344 8406 - 311 453 1985
 comercial@plastempack.com
 Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial
 Pradera Bogotá D.C - Colombia



RECOMENDACIONES

El Botiquín Reglamentario debe mantenerse en un lugar visible, señalizado y de fácil acceso, preferiblemente en áreas secas y protegidas de la humedad, el polvo y la exposición directa a la luz solar o altas temperaturas, con el fin de preservar la integridad de sus componentes. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar el estado del estuche, la integridad de los empaques y las fechas de vencimiento de los insumos, garantizando la reposición inmediata de los elementos utilizados, vencidos o deteriorados.

Es importante que las personas responsables conozcan la ubicación del botiquín y cuenten con nociones básicas en primeros auxilios para su correcta utilización. En caso de presentarse una emergencia de mayor complejidad, el botiquín debe emplearse únicamente como apoyo inicial mientras se solicita y espera la atención de los servicios médicos especializados. Mantener siempre el contenido completo conforme a la lista reglamentaria.

INDICACIONES DE USO

1. Verifique que el entorno sea seguro antes de intervenir.
2. Colóquese guantes y tapabocas para protección personal.
3. Evalúe el estado de la persona y, si es necesario, utilice el pito para solicitar ayuda.
4. Limpie la herida con agua mineral, toalla antiséptica, algodón o gasa.
5. Cubra la lesión con gasa o banditas y asegure con venda elástica.
6. Utilice los demás elementos según la necesidad: cuello ortopédico para inmovilización preventiva, bajalenguas para inspección, y los insumos como jeringa, bisturí o analgésico únicamente por personal capacitado.
7. En caso de emergencia grave, contacte inmediatamente a los servicios médicos y reponga los elementos utilizados.

SEDE PRINCIPAL

 PBX: (57 -601) 829 5743 - 829 5798

 320 214 9004 - 321 983 4472

 mercadeo@plastempack.com

 Parque Industrial San Jorge Mz. P5
Bodega # 52 Troncal de Occidente
Km 19 Vía Bogotá Mosquera
Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ

 PBX: (57 -601) 261 3005 - 447 6304

 320 344 8406 - 311 453 1985

 comercial1@plastempack.com

 Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial
Pradera Bogotá D.C - Colombia