



**FICHA TÉCNICA**  
**BOTIQUÍN**

**PRIMEROS AUXILIOS**

**TIPO C**

**DESCRIPCIÓN**

El Botiquín Tipo C es un kit de atención prehospitalaria de alta capacidad, diseñado para brindar respuesta inicial ante emergencias de mayor complejidad en entornos empresariales, industriales, institucionales y educativos. Contiene una amplia variedad de insumos para el manejo de heridas, hemorragias, inmovilización de extremidades, control de signos vitales y atención básica mientras se coordina la asistencia médica especializada. Gracias a su mayor dotación de materiales estériles, dispositivos de evaluación y medicamentos de uso común, permite atender simultáneamente múltiples incidentes y ofrecer una respuesta organizada, eficiente y oportuna ante situaciones de emergencia.

**USOS**

El Botiquín Tipo C está diseñado para la atención inicial de emergencias de mayor complejidad en empresas, industrias, instituciones, centros educativos y otros entornos con alta afluencia de personas. Es adecuado para el manejo de heridas abiertas, hemorragias severas y moderadas, quemaduras, contusiones, esguinces, fracturas sospechosas que requieran inmovilización, así como para la evaluación básica de signos vitales y la atención simultánea de múltiples lesionados. Su amplia dotación permite brindar un soporte prehospitalario oportuno mientras se coordina el traslado y la atención por parte de los servicios médicos especializados.

**RECOMENDACIONES**

El Botiquín Reglamentario debe mantenerse en un lugar visible, señalizado y de fácil acceso, preferiblemente en áreas secas y protegidas de la humedad, el polvo y la exposición directa a la luz solar o altas temperaturas, con el fin de preservar la integridad de sus componentes. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar el estado del estuche, la integridad de los empaques y las fechas de vencimiento de los insumos, garantizando la reposición inmediata de los elementos utilizados, vencidos o deteriorados.



Es importante que las personas responsables conozcan la ubicación del botiquín y cuenten con nociones básicas en primeros auxilios para su correcta utilización. En caso de presentarse una emergencia de mayor complejidad, el botiquín debe emplearse únicamente como apoyo inicial mientras se solicita y espera la atención de los servicios médicos especializados. Mantener siempre el contenido completo conforme a la lista reglamentaria.



## ESTA COMPUESTO POR

Item	Und	Item	Und	Item	Und
Gasas limpias paquete x 100	2	Bolsa de suero fisiológico x 250 ml	10	Inmovilizadores o férulas miembros superiores e inferiores (adulto)	2
Gasas estériles paquete x 5	20	Guantes de látex y/o vinilo caja x 100	1	Inmovilizadores o férulas miembros superiores e inferiores (pediátrico)	2
Apósito o compresas no estériles	8	Termómetro cinta	2	Vasos desechables x 25 und	2
Esparadrado de tela rollo de 2" x 5 yardas	4	Alcohol antiséptico frasco por 345 ml	2	Fonendoscopio	1
Bajalenguas paquete x 20	4	Tijeras trauma	2	Acetaminofén tabletas 500 mg sobre x 10	4
Venda elástica 2" x 5 yardas	4	Linterna recargable	4	Hidróxido de aluminio tabletas sobre x 10	4
Venda elástica 3" x 5 yardas	4	Pilas de repuesto paquete x 4	1	Tabletas de aspirina sobre x 10	2
Venda elástica 5" x 5 yardas	4	Collar cervical adulto	4	Elemento de barrera o mascarara para RCP	2
Venda de algodón 3" x 5 yardas	4	Collar cervical niño	4	Clorhexidina o yodopovidona jabón quirúrgico x galón	2
Venda de algodón 5" x 5 yardas	4	Tensiómetro	1		

## INDICACIONES DE USO

1. Verifique que el área sea segura antes de intervenir.
2. Colóquese los guantes y demás elementos de protección disponibles.
3. Evalúe el estado de la persona: nivel de conciencia, respiración y tipo de lesión.
4. En caso de hemorragia, aplique presión directa con gasas o apósitos y asegure con venda o esparadrado.
5. Limpie y desinfecte heridas con solución antiséptica o solución salina según corresponda.
6. Si existe sospecha de fractura o lesión cervical, utilice los inmovilizadores o el collar cervical evitando movimientos innecesarios.
7. Controle signos vitales con los dispositivos disponibles (termómetro, tensiómetro si aplica).
8. Mantenga a la persona en reposo y active de inmediato los servicios de emergencia si la situación lo requiere.
9. Reponga los elementos utilizados y registre el evento según el protocolo interno.

### SEDE PRINCIPAL

PBX: (57-601) 829 5743 - 829 5798  
 320 214 9004 - 321 983 4472  
 mercadeo@plastempack.com  
 Parque Industrial San Jorge Mz. P5  
 Bodega # 52 Troncal de Occidente  
 Km 19 Vía Bogotá Mosquera  
 Madrid - Colombia.

### SEDE BOGOTÁ

PBX: (57-601) 261 3005 - 447 6304  
 320 344 8406 - 311 453 1985  
 comercial1@plastempack.com  
 Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial  
 Pradera Bogotá D.C - Colombia